

RYG-/NAKKE-VARMEPUDE

Betjeningsvejledning



Model: ANP 100

Indholdsfortegnelse

Dele og betjeningselementer / Leveringsomfang ..3

Sikkerhedsanvisninger.....4

Mange tak for din tillid! 4

Anvendte symboler 4

Tilsluttet brug 5

Vigtige anvisninger! Gem betjeningsvejledningen til senere brug! 6

Anvendelse9

Anvendelse 9

Anvendelse / Rengøring10

Automatisk slukfunktion 10

Overophedningsbeskyttelse 10

Rengøring 10

Opbevaring / Fejl / Problemer11

Opbevaring 11

Fejl / Problemer 11

Bortskaffelse / Overensstemmelseserklæring /

Tekniske data12

Bortskaffelse 12

Overensstemmelseserklæring 12


Tekniske data 12

Garantibetingelser13

Garantikort14

Dele og betjeningslementer / Leveringsomfang

Dele og betjeningslementer

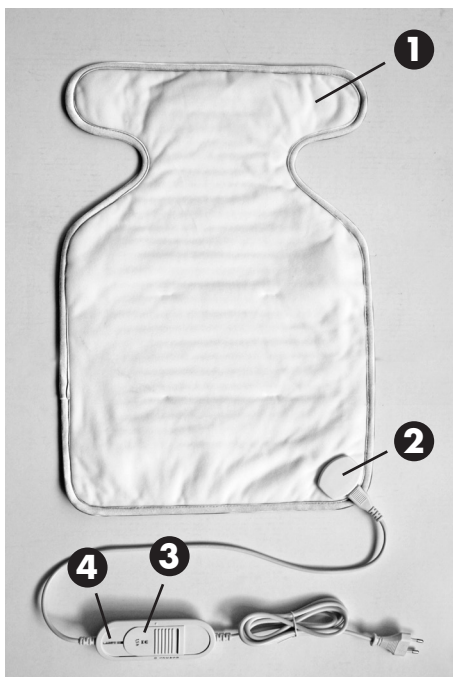

- 1** Varmepude
- 2** Forbindelsesstik
- 3** 6-trins-kontakt
- 4** Kontrollampe

- 5** Stofbetræk
- 6** Velcrobånd
- 7** Mavebælte

Leveringsomfang

- Varmepude
- Stofbetræk
- 6-trins-kontakt MP1201
- Betjeningsvejledning

Sikkerhedsanvisninger





Mange tak for din tillid!

Tillykke med din nye ryg-/nakke-varmepude – vi er overbevist om, at du bliver tilfreds med den.







- Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem før første ibrugtagning, og følg altid sikkerhedsanvisningerne!
- Alle handlinger på og med denne ryg-/nakke-varmepude skal altid udføres, som de beskrives i betjeningsvejledningen.
- Gem betjeningsvejledningen og alle medfølgende bilag, så:
 - du kan finde dem ved behov,
 - de er tilgængelige i hele ryg-/nakke-varmepudens levetid,
 - der er tilgængelige for enhver senere bruger af ryg-/nakke-varmepuden.

Anvendte symboler

Følgende Symbole befinden sich auf dem Rücken-Nacken-Heizkissen:

Læs anvisningerne!	
Brug ikke ryg-/nakke-varmepuden i foldet eller sammenklemt tilstand	
Stik ikke nåle ind i ryg-/nakke-varmepuden	
Varmepuden til ryg og nakke må ikke anvendes af meget unge børn (0-3 år).	

Sikkerhedsanvisninger

Ryg-/nakke-varmepuden kan maskinvaskes på et skåneprogram ved 30 °C	
Ryg-/nakke-varmepuden må ikke bleges	
Ryg-/nakke-varmepuden må ikke tørres i tørretumbler	
Ryg-/nakke-varmepuden må ikke stryges	
Ryg-/nakke-varmepuden må ikke renses kemisk	
Öko-Tex 100 Dette produkt er testet i alle bearbejdningstrin efter det globalt gældende test- og certificeringssystem for tekstile rå-, mellem- og slutprodukter. Kontrollerne af skadelige stoffer omfatter lovmæssigt forbudte og reglementerede substanser, kendte sundhedsbetænkelige kemikalier samt parametre til sundhedsforebyggelse.	

Tilsigtet brug

Anvend kun ryg-/nakke-varmepuden på mennesker til varmebehandling af ryg- og nakkeområdet.

Ryg-/nakke-varmepuden må ikke anvendes af personer, som ikke kan føle varme (f.eks. diabetikere), småbørn og hjælpkrævende personer.

Ryg-/nakke-varmepuden er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.

Ryg-/nakke-varmepuden er ikke et medicinsk apparat og må ikke anvendes på hospitaler.



Anvend altid ryg-/nakke-varmepuden med stofbetræk for at beskytte mod beskadigelser og snavs.

Sikkerhedsanvisninger

Vigtige anvisninger! **Gem betjeningsvejledningen til senere brug!**

Læs følgende sikkerhedsanvisninger grundigt igennem.
Hvis sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes, kan det medføre alvorlige eller beskadigelse af ryg-/nakke-varmepuden.

Vigtige sikkerhedsanvisninger for brugerens og ryg-/nakke-varmepudens sikkerhed er markeret som følger i denne betjeningsvejledning:

 ADVARSEL	En sikkerhedsanvisning med signalordet "ADVARSEL" advarer mod personrisici, som muligvis kan medføre alvorlige personskader eller døden.
 FORSIGTIG	En sikkerhedsanvisning med signalordet "FORSIGTIG" advarer mod personrisici, som muligvis kan medføre lette eller moderate personskader eller døden.
VIGTIGT	En sikkerhedsanvisning med signalordet "VIGTIGT" advarer mod tingsskader.

 **ADVARSEL** Kvælningsfare

- Hold børn på afstand af emballagematerialet.

 **ADVARSEL** Fare for personskader

- Børn under tre år må ikke anvende denne varmepude til ryg og nakke, fordi de ikke er i stand til at reagere på overophedning.
- Varmepuden til ryg og nakke må ikke anvendes af unge børn over 3 år, medmindre 6-trins-kontakten er indstillet af en af barnets forældre eller en anden ansvarlig person, eller hvis barnet er blevet instrueret tilstrækkeligt i, hvordan 6-trins-kontakten anvendes sikkert.

Sikkerhedsanvisninger

- Denne varmpude til ryg og nakke kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet undervist i sikker brug af varmpuden til ryg og nakke og forstår de dermed forbundne farer.”
- Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med ryg-/nakke-varmpuden.
- Rengørings- og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Denne varmpude til ryg og nakke må ikke anvendes af personer, som er ufølsomme over for varme, eller af andre plejekrævende personer, som ikke kan reagere på overophedning.
- Denne varmpude til ryg og nakke er ikke beregnet til brug på hospitaler.
- Hvis du har pacemaker, skal du rådføre dig med din læge og producenten af pacemakern, før du bruger ryg-/nakke-varmpuden. Der kan eventuelt udgå magnetiske og elektriske felter fra ryg-/nakke-varmpuden, som kan påvirke pacemakers funktionalitet.



ADVARSEL

mod hudforbrændinger

Ved for lang tids anvendelse af ryg-/nakke-varmpuden kan der forekomme hudforbrændinger!

- Hvis du anvender ryg-/nakke-varmpuden i længere tid, bør du vælge det laveste varmetrin.
- Anvend aldrig ryg-/nakke-varmpuden direkte på huden. Sørg altid for at have tøj på, når du bruger ryg-/nakke-varmpuden.
- Pas på, at du ikke falder i søvn, mens du bruger ryg-/nakke-varmpuden.
- Anvend ikke ryg-/nakke-varmpuden, når du har nydt alkohol eller taget smertestillende medicin.

Sikkerhedsanvisninger



ADVARSEL

Livsfare pga. elektrisk stød

- Kontrollér ofte, om ryg-/nakke-varmepuden viser tegn på slid eller beskadigelser. Hvis sådanne tegn viser sig, eller hvis ryg-/nakke-varmepuden har været anvendt forkert, skal den sendes til kundeservice, før den tages i brug igen.
- Hvis netledningen på denne ryg-/nakke-varmepude er blevet beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå farer.
- Anvend ikke ryg-/nakke-varmepuden, hvis den er fugtig eller våd.
- Stik ikke nåle i ryg-/nakke-varmepuden


VIGTIGT

Beskyt ryg-/nakke-varmepuden mod beskadigelse


- Brug ikke ryg-/nakke-varmepuden i foldet eller sammenklemt tilstand.
- Sørg for, at ryg-/nakke-varmepuden ligger på kroppen uden folder.
- Anvend kun ryg-/nakke-varmepuden med den medfølgende 6-trins-kontakt.
- Slut kun ryg-/nakke-varmepuden til den spænding, der fremgår af ryg-/nakke-varmepuden.
- Undlad at bøje kablerne kraftigt, dreje eller trække i dem.
- Lad varmepuden til ryg og nakke køle helt af, før du folder den sammen og lægger den væk.
- Opbevar varmepuden til ryg og nakke på et tørt, køligt sted (helst i den originale emballage), når du ikke bruger den.
- Læg ikke nogen tunge genstande oven på varmepuden til ryg og nakke, fordi den ikke må foldes skarpt.
- Vigtige henvisninger findes også i afsnittene Rengøring og Opbevaring.

Anvendelse


Anvendelse

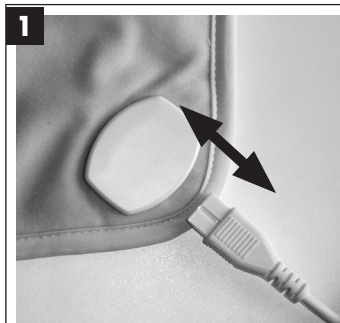


Forbind 6-trins-kontakten med ryg-/nakke-varmepuden via forbindelsesstikket.

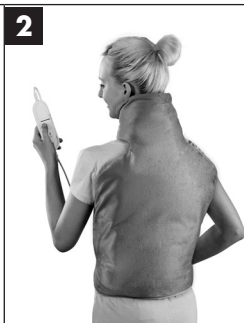

Læg ryg-/nakke-varmepuden på som vist. Sørg for, at velcrobåndet ligger på højde med halsen.

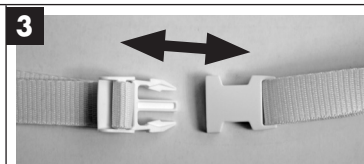

Indstil den ønskede bæltelængde på mavebæltet. Luk mavebæltet. Sæt netstikket i stikkontakten.

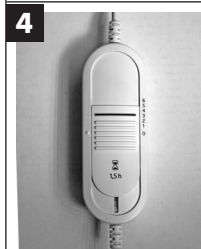

Vælg det ønskede varmetrin på 6-trins-kontakten. Hvis du anvender ryg-/nakke-varmepuden i længere tid, bør du vælge det laveste varmetrin.

5

Når du er færdig med at bruge varmepuden til ryg og nakke, skal du trække stikket ud af stikkontakten og frakoble 6-trins-kontakten fra varmepuden til ryg og nakke.

Anvendelse / Rengøring

Automatisk slukfunktion

Ryg-/nakke-varmepuden slukker automatisk efter 1,5 times brug. Kontrollampen på 6-trins-kontakten blinker. Hvis du vil tage ryg-nakke-varmepuden i brug igen, skal du først vælge varmetrin „0“. Efter 5 sekunder er ryg-/nakke-varmepuden igen klar til brug, og du kan igen indstillet det ønskede varmetrin.

Overophedningsbeskyttelse

Ryg-/nakke-varmepuden er forsynet med overophedningsbeskyttelse. Hvis ryg-/nakke-varmepuden skulle blive overophedet, slukkes den automatisk. Af hensyn til sikkerheden kan ryg-/nakke-varmepuden ikke længere anvendes efter aktivering af overophedningsbeskyttelsen. Kontrollampen på 6-trins-kontakten lyser da heller ikke mere, selv om ryg-/nakke-varmepuden er tændt. Kontakt i så fald kundeservice.

Rengøring

⚠ ADVARSEL Livsfare pga. elektrisk stød

Træk altid først netstikket ud af stikkontakten, før du rengør ryg-/nakke-varmepuden!

1. Åbn velcrolukningen på stoffetrækket, og tag ryg-/nakke-varmepuden ud.
2. Stoffetrækket kan maskinvaskes på et skåneprogram ved 30 °C, anvend et vaskemiddel til finvask.
3. Afbryd 6-trins-kontakten fra ryg-/nakke-varmepuden ved forbindelsesstikket.
4. Kontakten må ikke nedsænkes i vand. Rengør kontakten med en tør rengøringsklud.
5. Ryg-/nakke-varmepuden kan maskinvaskes på et skåneprogram ved 30 °C, anvend et vaskemiddel til finvask.
6. Varmepuden til ryg og nakke egner sig ikke til tørring i tørretumbler, strygning, kemisk rens eller vask med blegemidler.
7. Lad ryg-/nakke-varmepuden og forbindelsesstikket tørre helt.

⚠ ADVARSEL Livsfare pga. elektrisk stød

- Kontrollér, at ryg-/nakke-varmepuden og forbindelsesstikket helt tørre, før du tager ryg-/nakke-varmepuden i brug igen. Forbind først 6-trins-kontakten med ryg-/nakke-varmepuden igen, når forbindelsesstikket er helt tørt. Sæt først netstikket i en stikkontakt igen, når ryg-/nakke-varmepuden er helt tør.

Opbevaring / Fejl / Problemer

Opbevaring

VIGTIGT

Beskyt ryg-/nakke-varmepuden mod beskadigelse

- Lad ryg-/nakke-varmepuden køle helt af, før du folder den sammen.
- Opbevar ryg-/nakke-varmepuden på et tørt, køligt sted (helst i den originale emballage), når du ikke bruger den.
- Læg ikke nogen tunge genstande oven på ryg-/nakke-varmepuden, fordi den ikke må foldes skarpt.

Fejl / Problemer

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Ryg-/nakke-varmepuden bliver ikke varm.	Netstikket er ikke sat i stikkontakten.	Sæt netstikket i stikkontakten.
	6-trins-kontakten er ikke forbundet med ryg-/nakke-varmepuden via forbindelsesstikket.	Forbind 6-trins-kontakten med ryg-/nakke-varmepuden via forbindelsesstikket.
	Ryg-/nakke-varmepuden er defekt (kontrollampen lyser ikke).	Henvend dig til kundeservice.
	Varmpuden blev slukket automatisk (kontrollampen blinker).	Se kapitlet: „Automatisk slukfunktion“.

Bortskaffelse / Overensstemmelseserklæring / Tekniske data

Bortskaffelse

Bortskaf ikke ryg-/nakke-varmepuden med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaf ryg-/nakke-varmepuden i henhold til Rådets direktiv om elektrisk og elektronisk affald (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Dette direktiv gør opmærksom på, at du skal bortskaffe ryg-/nakke-varmepuden på en kommunal genbrugsstation, der modtager elektrisk og elektronisk affald.

Kontakt kommunen for at få nærmere oplysninger om gratis genbrugsstationer i nærheden af dig.

Produktemballagen er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Disse materialer skal bortskaffes på miljøvenlig vis og sorteres i de opstillede opsamlingsbeholdere.

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer producenten, at denne ryg-/nakke-varmepude er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige gældende bestemmelser i gældende europæiske direktiver.

Tekniske data

Model: ANP 100

Spænding: 230 V / 50 Hz

Effekt: 100 W

Beskyttelsesklasse: II /

Automatisk slukning: Efter 1,5 timer

Mål: 54 x 38 cm

Producent: Euromedics GmbH, Beckers Kreuz 13, D-53343 Wachtberg, Germany

Denne betjeningsvejledning kan også downloades som pdf-fil fra vores hjemmeside www.euromedics.de.

Garantibetingelser

Garantibetingelser

Kære kunde!

Vores produkter er underlagt en streng kvalitetskontrol. Hvis dette apparat mod forventning ikke skulle fungere fejlfrit, beklager vi dette dybt og beder dig om at kontakte os på den serviceadresse, der fremgår af garantikortet. Du er også velkommen til at ringe til os på det service-hotlinenummer, som er trykt på garantikortet.

For at gøre garantikrav gældende kræves – uden at dette begrænser dine lovbestemte rettigheder – følgende:

1. Du kan gøre garantikrav gældende i maks. 3 år efter købsdatoen. Vores garanti dækker udelukkende afhjælpning af materiale- og produktionsfejl eller udskiftning af apparatet. Vi yder garantien uden beregning.
2. Garantikrav skal gøres gældende omgående, når de opstår. Det er ikke muligt at gøre garantikrav gældende efter garantiperiodens udløb, medmindre garantikravene gøres gældende inden for en frist på 2 uger efter garantiperiodens udløb.
3. Hvis apparatet bliver defekt, skal det sendes portofrit til serviceadressen sammen med garantikort og kassebon. Hvis defekten ligger inden for rammerne af garantiens dækning, vil du få et repareret eller nyt apparat retur. Reparation eller udskiftning af apparatet betyder ikke, at en ny garantiperiode påbegyndes. Garantiperioden løber principielt 3 år fra købsdatoen. Dette gælder også, hvis der ydes service lokalt.

Bemærk, at garantien bortfalder i tilfælde af misbrug eller forkert behandling, i tilfælde af tilsidesættelse af de for apparatet gældende sikkerhedsforskrifter, ved udøvelse af vold mod apparatet eller ved indgreb, som ikke er udført på den af os autoriserede serviceadresse. Defekter på apparatet, som ikke er omfattet af garantien, eller skader, som har medført, at garantien er bortfaldet, afhjælper vi mod debitering af vores omkostninger. I så fald beder vi dig om at sende apparatet til vores serviceadresse:

MPR Riese GmbH
Grandkaule 11
D-53859 Niederkassel

Service-Telefonnummer: 0800 56575000

Guarantecard

Skriv afsender med STORE BLOKBOGSTAVER i felterne!

Efternavn

Fornavn

Gade

Postnummer og by

Telefon med forvalg



Model: RYG-/NAKKE-VARMEPUDE

Købers underskrift

36 måneders garanti fra købsdatoen

Hvis du vil gøre brug af garantien, skal du sammen med det defekte apparat indsende garantikortet og kassebonen samt om muligt en detaljeret fejlbeskrivelse.

Fejlbeskrivelse

Klip dette afsnit ud, og indsend det sammen med ryg-/nakke-varmepuden





